



Istruzioni per eseguire una corretta raccolta del DNA

Procedura per la corretta modalità di prelievo, raccolta e preparazione dei campioni biologici necessaria ad assicurare la qualità del dato analitico, e quindi la qualità dell'analisi offerta.

TIPO DI CAMPIONE

Tampone buccale

KIT TAMPONE BUCCALE

- Scheda accettazione
- Consenso informato
- Informativa privacy
- Procedura di istruzioni prelievo
- 2 tamponi
- 1 paio di guanti in lattice
- 1 busta Biohazard
- 1 busta per spedizione



PROCEDURA DI RACCOLTA CON TAMPONE BUCCALE

Per effettuare correttamente la procedura di raccolta non invasiva del DNA, mediante tampone buccale, è importante:

- **Non mangiare entro 30 min dalla raccolta;**
- **Non bere entro 30 min dalla raccolta;**
- **Non masticare gomme;**
- **Non lavare i denti durante l'ora precedente alla raccolta.**

Può inoltre essere utile un breve risciacquo con acqua naturale a temperatura ambiente prima di procedere allo strofinamento con il tampone.

NB: Nel caso di neonato effettuare il prelievo a distanza di due ore dall'allattamento.

MODALITÀ DI COSERVAZIONE E INVIO

conservare il campione a temperatura ambiente e spedire entro 24 ore.



TAMPONE BUCCALE

- 1 Aprire la confezione e indossare i guanti in lattice.
- 2 Prendere la provetta col tampone ed estrarre il tampone.

Attenzione! Non toccare la parte in cotone del tampone per evitare la contaminazione!

- 3 È consigliabile strofinare il tampone su entrambe le guance e sulla mucosa interna delle labbra. Ripetere l'azione più volte accertandosi di avere eseguito correttamente la procedura.

N.B. per una raccolta standard è necessario strofinare il tampone per almeno 60 secondi.

Alla fine della raccolta maneggiare il tampone accuratamente.

- 4 Inserire nuovamente il tampone nella provetta.
- 5 Chiudere accuratamente il tampone fino a sentirne lo scatto definitivo che preserverà il campione durante la spedizione.
- 6 Inserire la provetta nella busta Biohazard e richiuderla rimuovendo la striscia protettiva.
- 7 Inserire la busta biohazard all'interno della scatola corredata di foglio di accettazione. Il kit va spedito a temperatura ambiente.
- 8 Inserire la scatola nella busta per la spedizione ed inviare una email a **logistica@laboratoriogenoma.it** indicando:
 - nome e cognome
 - indirizzo completo dove ritirare il kit
 - numero di telefono
 - indicazione di una finestra oraria di almeno 3 ore in cui far arrivare il corriere.

(Attendere l'email di conferma ritiro che conterrà anche il codice della spedizione)

